


Wachs: Kauflächengestaltung / Wax: occlusal surface modelling

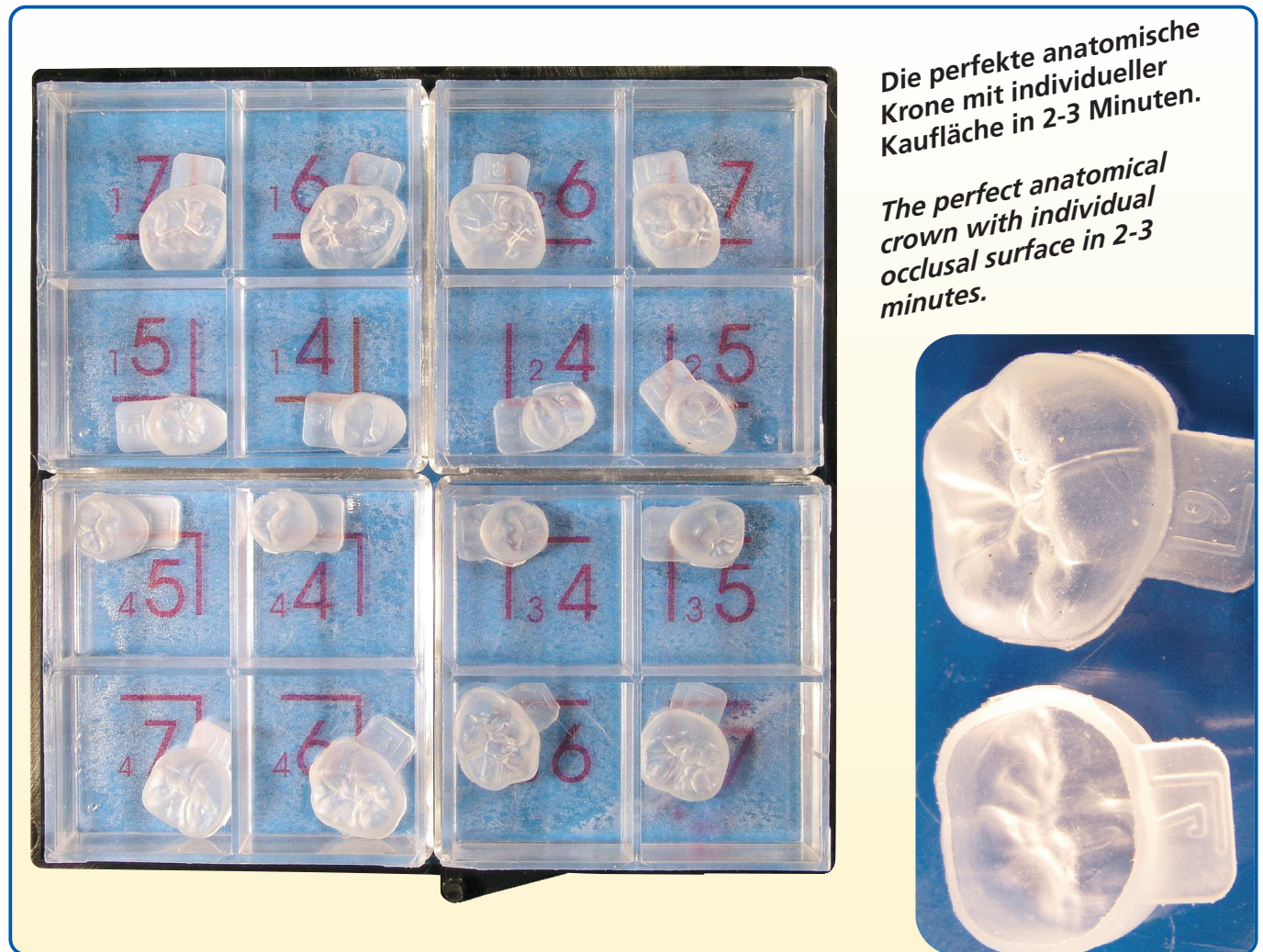

Die perfekte anatomische Krone mit individueller Kaufläche in 2-3 Minuten.

The perfect anatomical crown with individual occlusal surface in 2-3 minutes.



Okkluflex

Die einfache und schnelle Methode, gnathologische Kauflächen individuell zu gestalten.

The fast and easy method to generate gnathological occlusal surfaces.

Bestell-Nr.: 11100

Order-no.: 11100

- Hochzerreifest aus Silcotex
- Reduzierend
- Transparent (fr Lichthrtung)
- Standfest
- Selbstisolierend
- Geeignet fr Wachs, Keramik und Komposite
- Bei Keramik Verwendung mit Kera-Sep-Spray (Bestell-Nr. : 11141)

- Highly tear-resistant quality (silcotex)
- Retracts to original shape
- Translucent (for light curing)
- Stable on flat surface
- Self-isolating
- Suitable for wax, composites and ceramics
- To be used together with Kera-Sep Spray for ceramics (Order-no.: 11141)

Nachfllpackungen je 2 Stck

Refill 2 pcs each

Bestell-Nr.:

Order-no.:

1110-14	1110-24	1110-34	1110-44
1110-15	1110-25	1110-35	1110-45
1110-16	1110-26	1110-36	1110-46
1110-17	1110-27	1110-37	1110-47

1110-14	1110-24	1110-34	1110-44
1110-15	1110-25	1110-35	1110-45
1110-16	1110-26	1110-36	1110-46
1110-17	1110-27	1110-37	1110-47


Wachs: Kauflächengestaltung / Wax: occlusal surface modelling




- ① Wachskappe in gewohnter Weise fertigen.
Model wax-coping as usual.



- ⑤ ... und anatomische Form komplettieren.
... and complete the anatomical shape.

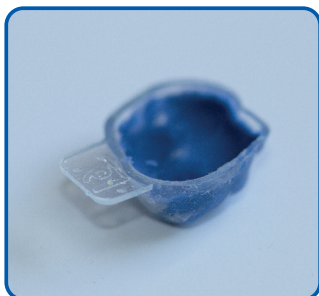

- ② Flexette mit Modellierwachs zu 2/3 füllen.
Fill pattern with modelling wax 2/3.

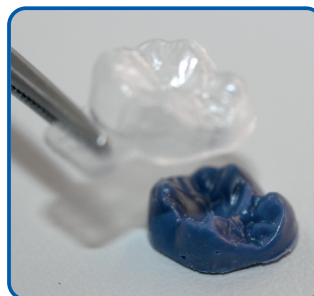

- ⑥ Wachskaufläche
Occlusal surface wax




- ③ Flexette im plastischen Zustand auf Wachskappe aufwachsen.
Place pattern on top of the wax-coping before wax hardens.



- ⑦ Keramikkaufläche
Occlusal surface ceramic



- ④ Okklusion im Artikulator überprüfen...
Check bite in the articulator...

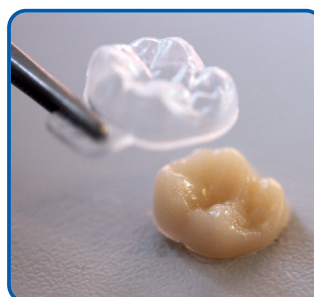

- ⑧ Kompositkaufläche
Occlusal surface composite