

RTS

Rotary Time System

1 1. Arbeitsgang: Finieren (15 - 30 Sek.) *1st step: finishing (15 - 30 sec.)*

Ultra Light

13 - 15 microns

Der spiralisierte FG Diamant
The spiral FG diamond



2 2. Arbeitsgang: Polieren (5 - 10 Sek.) *2nd step: polishing (5 - 10 sec.)*

Uporal®

1' - 3000 Upm 6 - 8 microns

Der dauerhafte Oralpolierer
The durable oral polisher

Geeignet für Komposit,
 Glas-Ionomere, Keramik
 und Amalgam.
 – Uporal® C und D.

*Suitable for composites,
 glas-ionomeres, ceramics
 and amalgam.*
 – Uporal® C and D.

Uporal® C
 (Metalle, Amalgam)
 (metals, amalgam)

Uporal® D
 (Komposit, Keramik, o.ä.)
 (composites, ceramics, etc.)




3 3. Arbeitsgang: Hochglanz (5 - 10 Sek.) *3rd step: high shine (5 - 10 sec.)*

Diafix®-Oral

1' - 3000 Upm 3 - 4 microns

Der Einmal-Hochglanz-
 Diamantpolierer
*The disposable diamond-
 impregnated polisher*

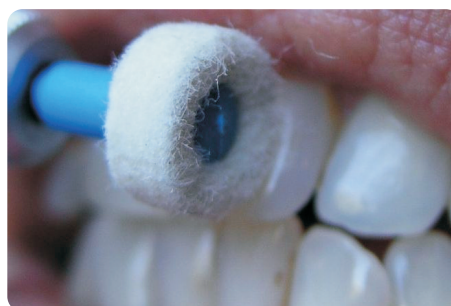

- ✓ Zeitgewinn
Fast results
- ✓ Exzellente Poliererergebnisse
Superior polishing results
- ✓ Kostenersparnis
Superior economics




- Zum Polieren von Keramik, Komposit oder ähnlichen Füllungsmaterialien
- *For polishing ceramics, composites and similar*

- Zur Bearbeitung von Amalgam und Metallen
- *To be used on amalgam and metals*



- Zur Prophylaxe-Behandlung
- *For prophylaxis*

- Deutlich höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen WST-Silikonpolierern, abhängig von Form und Material.
- *Extremely long lasting compared to traditional CA-silicone polishers, depending on size and material.*

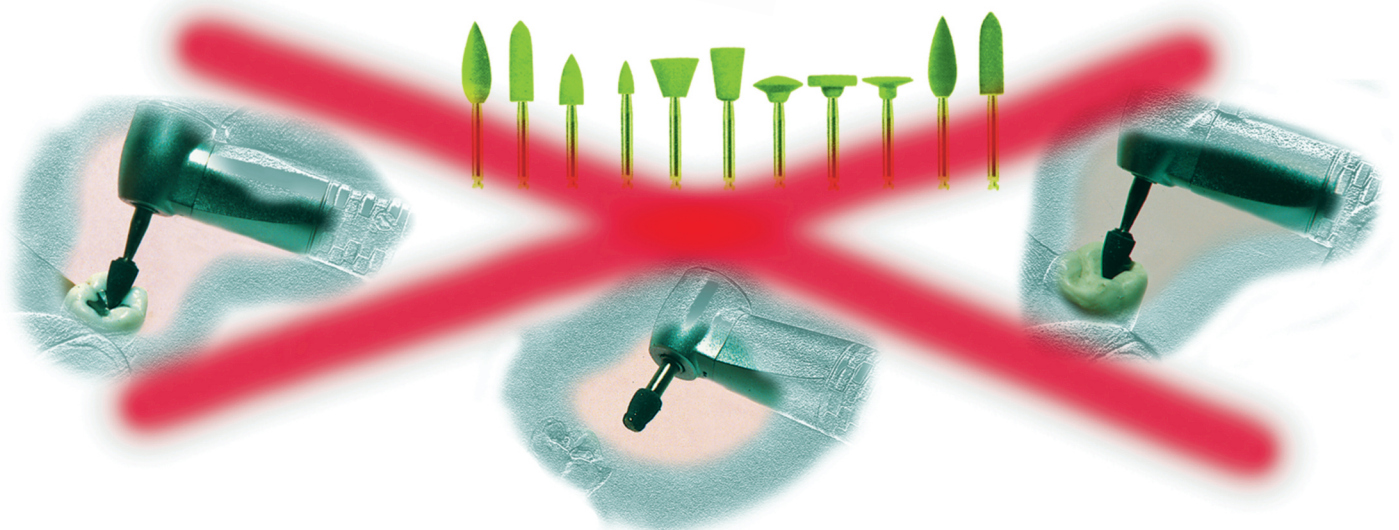

RTS: Die bessere, wirtschaftliche Alternative zu Silikonpolieren.
RTS: The superior alternative to silicone polishers.

Ultra-Light

ISO Nr.:
806 314 ...

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	140	165	248	257
Ø 1/10 mm	010	014	014	023
KL/hl	6	8	6	4,5
Nachfüllpack / refills	2	2	2	2

504 superfein / superfine

532020

532100

532120

532040

1

Diese 4 Finierer decken alle restaurativen Arbeiten ab.

These 4 shapes are all you need for finishing restorative work.

Uporal® C + D

Nur 1' - 3000 Upm
1' - 3000 rpm only

Uporal® C

(mit Siliziumcarbid)

- Für Metall und Amalgam
For metals and amalgam
- Der ideale Prophylaxe Polierer
The ideal prophylaxis polisher
- ohne zusätzliche Paste
no polishing paste needed

Uporal® D

(mit Diadurit®)

- Härtere Faser, geeignet für Keramik, Composite, Compomere, Ceromere u.ä.
- The tough fibre is most effective on ceramics, composites, compomeres, ceromeres, and similar*

2

Diese Polierer reichen für alle Polierarbeiten aus. Spezialpolierer aus wasserabweisender Faser, mit Siliziumcarbid oder Diadurit® imprägniert und autoklavierbar bis 134° C.

These polishers are all you need for polishing restorations. Special polishers made of waterrepellent fibre, impregnated with silicon carbide or Diadurit®, autoclavable up to 134° C.

ISO Nr.:
653 204...
bis 10 - 20 sec
up to 10 - 20 sec
Drehzahl / speed
1000 - 3000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	541	543	je 1 St. 1 pc each	541	542	165	542	je 1 St. (Kelch/Pinsel) 1 pc each (cup/point)
Ø 1/10 mm	070	135		070	045	135	045	
Nachfüllpack / refills	2	2	set	2	2	2	2	set

492 ultrafein / ultrafine

800949

800939

800909

801989

801999

801979

802019

801909

Diafix®-Oral

ISO Nr.:
010 204 ...
bis 5 - 15 Sek
up to 5 - 15 sec
Drehzahl / speed
1000 - 3000 Upm / rpm

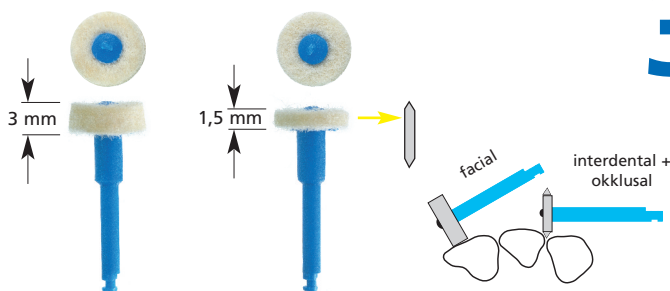


Fig.-Nr./shape no.	372		371
Ø 1/10 mm	090		090
h 1/10 mm	030		015
Nachfüllpack / refills	12		12

sortiert je 6 St.
assorted 6 pc each

set

491 ultrafein / ultrafine

80099

801999

802099


3

Zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar!

Nur mit Desinfektions-Liquid behandeln! Diamant-imprägnierte (3-5 µm), montierte Filzpolierer mit Pfefferminz-Geschmack.

For single use only, not for sterilization!
Only treat with disinfectants!
Felt polishers impregnated with diamonds (3-5µm), mounted, with peppermint flavour.

RTS-Intro-Set C

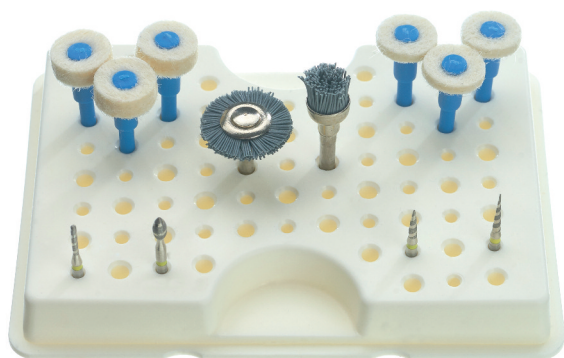

999000

RTS-Intro-Set C

- 12 Werkzeuge
12 instruments
- 1 Tray (bis zu 134°C sterilisierbar)
1 tray (sterilizable up to 134°C)

Polier-System für Metalle (Amalgam, NE-, CoCr-, Gold-, Platin-Legierungen, etc.) und zur Plaqueentfernung. Die extrem schnelle Bearbeitung durch **Uporal®** funktioniert effektiv und materialschonend, wenn vorher mit den spiralisierten **Ultra-Light-Diamanten** finiert wurde!

*Polishing system suitable for metals (amalgam, non-precious alloys including CoCr, gold and platinum alloys, and similar) and for plaque removal. For optimal performance using the **Uporal®**, finish in advance with the spiral-coated **Ultra-Light** diamonds.*

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm
532020	806 314	140	504	010
532100	806 314	165	504	014
532040	806 314	243	504	022
532120	806 314	248	504	014
80094	653 204	541	492	070
80093	653 204	543	492	135
80092	010 204	372	491	090
81092	010 204	371	491	090

RTS-Intro-Set D



999002

RTS-Intro-Set D

- 12 Werkzeug
12 instruments
- 1 Tray (bis zu 134°C sterilisierbar)
1 tray (sterilizable up to 134°C)

Das erste Polier-System, das sich für viele Materialien eignet: Komposite, Compomere, Polyglas, Ceromere, Keramik, Glas Ionomere u.ä. Die extrem schnelle Bearbeitung durch **Uporal®** funktioniert effektiv und materialschonend, wenn vorher mit den spiralisierten **Ultra-Light-Diamanten** finiert wurde!

*The first polishing system which is suitable for many materials: composites, compomeres, polyglas, ceromere, ceramics, glass ionomers and similar. For optimal performance using **Uporal®**, finish in advance with the spiral-coated **Ultra-Light** diamonds.*

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm
532020	806 314	140	504	010
532100	806 314	165	504	014
532040	806 314	243	504	022
532120	806 314	248	504	014
801980	653 204	541	492	070
801990	653 204	542	492	045
80092	010 204	372	491	090
81092	010 204	371	491	090